

Come formare il paradenti Game Guard per adulti o bambini:


Avvertenza:

Acqua bollente, i minori devono essere sorvegliati in ogni momento.




1 Formare il paradenti


- a. Riempire un contenitore adatto con acqua bollente e lasciare raffreddare per **30 secondi**.

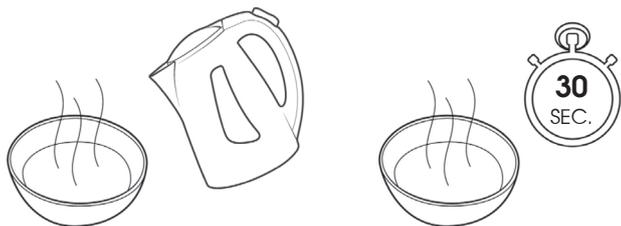

- b. Mettere il paradenti nell'acqua per **40 secondi**. **Non superare questo tempo**. Rimuovere con un utensile adatto.

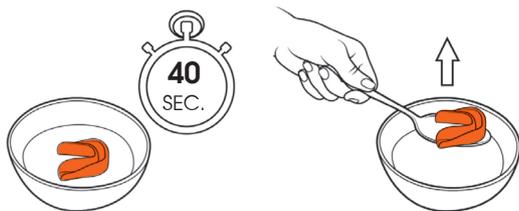


- c. Il paradenti dovrebbe apparire morbido e malleabile. In caso contrario rimetterlo in acqua per altri 10 secondi. **Nota:** se l'acqua si è raffreddata troppo, il paradenti non risulterà abbastanza morbido da poter essere modellato; se non si riesce a modellarlo, rimetterlo in acqua appena bollita.

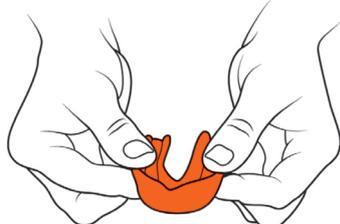

- d. Prima di modellarlo, lasciate raffreddare il paradenti adeguatamente. Posizionare con attenzione il paradenti intorno ai denti superiori, mordere fermamente risucchiando con forza e usare le dita per premere i bordi del paradenti nei denti e nelle gengive. **Continuare questo procedimento per 30 secondi**.

- e. Rimuovere il paradenti e raffreddare sotto acqua fredda corrente per **60 secondi**. Il paradenti deve essere freddo prima di rimetterlo in bocca.

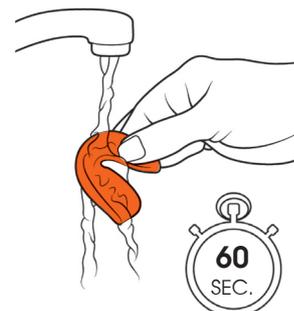

- f. Riposizionare il paradenti in bocca e verificare l'aderenza e la tenuta. Il paradenti non dovrebbe cadere da solo e dovrebbe risultare confortevole; in caso contrario, è possibile ripetere i passaggi precedenti.

Se dopo aver ripetuto il processo di modellamento si avverte ancora disagio, non usare.

2 Avvertenze importanti

- Non masticare il paradenti.
- Non indossare il paradenti se mostra segni di usura, crepe o rotture; in questo caso, smaltire il paradenti e sostituirlo con uno nuovo.
- Non permettere a nessun'altra persona che non sia il proprietario di usare il paradenti.
- Non esporre il paradenti a calore estremo o alla luce diretta del sole, conservarlo sempre nella scatola quando non viene utilizzato.
- Per i genitori - controllare regolarmente l'adattamento del paradenti dei propri figli per assicurarsi che non interferisca con lo sviluppo della bocca e dei denti.
- Se si ha un apparecchio o un altro dispositivo montato sui denti, si consiglia di consultare il proprio dentista o ortodontista in merito all'idoneità del paradenti. Non indossare mai un paradenti con un apparecchio a meno che non sia stato approvato dalla persona che applica l'apparecchio.
- I paradenti devono essere usati solo come dispositivi di protezione personale e non devono essere utilizzati per altri scopi, come un dispositivo antirussamento o un dispositivo per prevenire il digrignamento dei denti.

3 Conservazione del paradenti:

- Pulire sempre il paradenti con acqua fredda dopo l'uso
- Non usare colluttori, dentifrici o altri detergenti
- Pulire la scatola del paradenti con acqua calda Assicurarsi sempre che il paradenti sia asciutto prima di riporlo nella scatola
- Conservare sempre il paradenti nella sua scatola quando non viene utilizzato
- Scrivere il nome dell'utente in modo indelebile sulla scatola del paradenti

Nel caso in cui sia necessario restituire il paradenti, assicurarsi che venga restituito nella sua confezione originale, insieme a tutta la documentazione. Ogni scatola del paradenti è contrassegnata con il numero di lotto del fabbricante per facilitarne la rintracciabilità.

I paradenti sono stati testati in conformità con BSI DD 253:2001 e sono completamente conformi alla normativa CE; una copia del nostro certificato è disponibile per il download dal nostro sito web.